

NÁVOD K POUŽITÍ

HydroTouch – ve vodě rozpustný lubrikační gel (STERILNÍ)

POPIS

HydroTouch je sterilní ve vodě rozpustný lubrikační gel, který se používá při zasouvání trubice nebo nástroje do tělesné dutiny. Používá se k lubrikaci močových katétrů, endoskopů, chirurgických nástrojů atd. před jejich aplikací.

HydroTouch se také používá při gynekologických zákrocích při aplikaci výplachu, klystýru, rektálního teploměru a podobných typů hubic.

HydroTouch je čirý, ve vodě rozpustný, nedráždivý, lubrikační gel bez obsahu ropy.

SLOŽKY

Lubrikační látky (hydroxyethylcelulóza, propylenglykol) a čištěná voda.

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ

- Bez rizika uretrálního poranění, nekrózy nebo katérem vyvolané uretritidy.
- Riziko infekce močových cest se snižuje, protože nedochází k omezení obranných mechanismů močové trubice.
- Přístup pro čištění a výměnu katétru je jednodušší, umožňuje pacientům lepší péči o sebe samé. Poskytuje větší komfort, zejména pro pacienty upoutané na vozík.
- Uspodňuje pokusy o vyměšování po velké operaci.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte v případě, že máte alergii na některou složku produktu.
- Nejsou známy žádné vedlejší účinky. Pokud si všimnete vedlejšího účinku, informujte prosím svého lékaře, lékárníka nebo výrobce.
- Nepoužívejte, je-li obal poškozený. Uchovávejte mimo sluneční záření a uchovávejte v suchu.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Pouze na jedno použití. Zbytek nespoteřovaného produktu se musí zlikvidovat v souladu s platnými místními předpisy.
- Neaplikujte intravenózně ani intramuskulárně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

POUŽITÍ

Gel je k dispozici v různých velikostech. Obvykle se použije celý obsah velikosti vhodné pro danou proceduru. Stříkačka se vyjme ze sterilního obalu a požadované množství se aplikuje na tělo pacienta nebo lékařský přístroj.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při pokojové teplotě (5–30 °C) do data použitelnosti. Pouze na jedno použití.

BALENÍ

HYT-006 25*6 ml předplněná stříkačka
HYT-011 25*11 ml předplněná stříkačka

SYMBOLY



Sterilizace zářením



Není určeno k opakovanému použití



Neprovádějte opakovanou sterilizaci



Věnujte pozornost pokynům k použití



Teplota skladování



Nepoužívejte, je-li obal poškozený



Datum použitelnosti



Číslo šarže



Datum výroby



Uchovávejte v suchu



Chraňte před slunečním zářením



CE označení odpovídá Směrnici MDD 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích, 2292 je číslo "notifikované osoby"



Výrobce: **ISTEM MEDIKAL**

Anadolu O.S.B. Mahallesi 29 Ekim Caddesi č.41
Maliköy/Sincan/Ankara/TURECKO
Tel.: (321) 394 55 62-63

