

NÁVOD K POUŽITÍ

HydroTouch – ve vodě rozpustný lubrikační gel (STERILNÍ)

POPIS

HydroTouch je sterilní ve vodě rozpustný lubrikační gel, který se používá při zasouvání trubice nebo nástroje do tělesné dutiny. Používá se k lubrikaci močových katétrů, endoskopů, chirurgických nástrojů atd. před jejich aplikací.

HydroTouch se také používá při gynekologických zákrocích při aplikaci výplachu, klystýru, rektálního teploměru a podobných typů hubic.

HydroTouch je čirý, ve vodě rozpustný, nedráždivý, lubrikační gel bez obsahu ropy.

SLOŽKY

Lubrikační látky (hydroxyethylcelulóza, propylenglykol) a čištěná voda.

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ

- Bez rizika uretrálního poranění, nekrózy nebo katétre vyvolané uretritidy.
- Riziko infekce močových cest se snižuje, protože nedochází k omezení obranných mechanismů močové trubice.
- Přístup pro čištění a výměnu katétru je jednodušší, umožňuje pacientům lepší péči o sebe samé. Poskytuje větší komfort, zejména pro pacienty upoutané na vozík.
- Uspodňuje pokusy o vyměšování po velké operaci.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte v případě, že máte alergii na některou složku produktu.
- Nejsou známy žádné vedlejší účinky. Pokud si všimnete vedlejšího účinku, informujte prosím svého lékaře, lékárníka nebo výrobce.
- Nepoužívejte, je-li obal poškozený. Uchovávejte mimo sluneční záření a uchovávejte v suchu.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- Pouze na jedno použití. Zbytek nespotřebovaného produktu se musí zlikvidovat v souladu s platnými místními předpisy.
- Neaplikujte intravenózně ani intramuskulárně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

POUŽITÍ

Gel je k dispozici v různých velikostech. Obvykle se použije celý obsah velikosti vhodné pro danou proceduru. Stříkačka se vyjme ze sterilního obalu a požadované množství se aplikuje na tělo pacienta nebo lékařský přístroj.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při pokojové teplotě (5–30 °C) do data použitelnosti. Pouze na jedno použití.

BALENÍ

HYT-006	25*6 ml předplněná stříkačka
HYT-011	25*11 ml předplněná stříkačka
HYT-12.5	25*11 ml vytlačovací tubička

SYMBOLY

	Sterilizováno ozářením
	Není určeno k opakovanému použití
	Neprovádějte opakovanou sterilizaci
	Prostudujte si návod k použití
	Teplota skladování
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Datum použitelnosti
	Číslo šarže
	Datum výroby
	Uchovávejte v suchu
	Chraňte před slunečním zářením
	Zdravotnický prostředek
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Systém jednoduché sterilní bariéry
	Systém jednoduché sterilní bariéry s vnějším ochranným obalem
	Bez latexu
	Katalogové číslo
	Varování
	Limit pro stohování podle hmotnosti

CE 2292 CE označení odpovídá Směrnici MDD 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích, 2292 je číslo "notifikované osoby"



Výrobce: İSTEM MEDİKAL TIBBİ CİHAZ VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Anadolu O.S.B. Mah. 29 Ekim Cad. No:41
Maliköy/Sincan/Ankara/TURKEY
Tel: 0312 394 55 62-63 / www.istemmedikal.com